

הנחיות ניקוי מצלמת רשתית DRS Plus

בהתאם להוראות היצרן של מכשיר ה- iCare DRSpplus להלן ההנחיות לניקוי וחיתוי המכשיר, כולל החומרים המותרים והאסורים והתדירות המומלצת:

תדירות הניקוי והחיתוי המומלצת:

- **לאחר כל שימוש:** יש לנקות ולחטא את משענת המצח (כרית הסיליקון).
- **תהליך החיתוי הכללי:** מומלץ לבצע חיתוי של חלקי המגע לאחר כל שימוש במכשיר.
- **עדשה קדמית:** ניקוי העדשה יבוצע רק אם יש בכך צורך ממשי (במקרה של לכלוך נראה לעין).
- **תחזוקה תקופתית:** היצרן ממליץ על תחזוקה תקופתית על ידי טכנאי מורשה פעם בשנה.

חומרים מותרים לשימוש:

- **לניקוי כללי:** מטלית מיקרופייבר נקייה ללא סיבים, לחה עם כמות קטנה של מים (מי ברז) או סבון ידיים עדין.
- **לחיתוי:** מגבוני חיתוי המכילים איזופרופיל אלכוהול (IPA) 70% או מטלית רכה וחד-פעמית טבולה בתמיסת IPA 70%
- **לניקוי העדשה:** נייר ניקוי אופטי (צילומי) או מטלית מיקרופייבר ללא סיבים, יחד עם תמיסת ניקוי עדשות סטנדרטית.

חומרים ופעולות אסורות:

- **אין להשתמש** במגבוני חיתוי המכילים אקונומיקה.
- **אין להשתמש** במגבות או מטליות גסות לייבוש המכשיר.
- **אסור לאפשר** לנוזל להצטבר או על המשטח המחוטא למשך זמן רב.
- **אין לעשות שימוש חוזר** באותו אזור של מטלית הניגוב לאחר ניגוב אחד (יש להשתמש בחלק נקי של המטלית בכל מעבר).



הנחיות לביצוע הניקוי והחיטוי:

1. **מסך מגע ומעטפת חיצונית:** יש לנגב עם מטלית מיקרופייבר לחה במעט מים. לחיטוי, יש להשתמש במגבוני IPA 70% על כיסויי הפלסטיק, המסגרת והפאנל האחורי.
2. **משענת המצח (כרית סיליקון):** ניתן להסיר את הכרית ולשטוף אותה במים וסבון עדין. לחיטוי מהיר בין מטופלים, יש להשתמש במגבון אלוהול IPA 70%

3. ניקוי העדשה הקדמית:

- יש להשתמש במטלית או נייר ניקוי ייעודי עם תמיסת ניקוי.
 - יש להתחיל מהמרכז ולנגב בתנועה סיבובית אטית מאוד, סיבוב אחד מלא בלבד.
 - תנועת היציאה (התרחקות מהעדשה) חייבת להיות רדיאלית כלפי חוץ.
 - לחיטוי העדשה ניתן להשתמש ב-אלוהול IPA 70% באותה שיטה סיבובית.
4. **ייבוש:** יש לאפשר לכל המשטחים להתייבש לחלוטין לפני תחילת בדיקה חדשה.
- חשוב:** לצורך ניקוי העדשה, ניתן להעביר את המכשיר למצב "Lens cleaning position" דרך תפריט Utilities במכשיר, כדי לחשוף את העדשה בצורה נוחה.

